


# מוט עזר להליכה-הוראות שימוש



- להוציא את המוט מהאריזה.  
לשחרר את סרט ההצמדה הצבעוני.

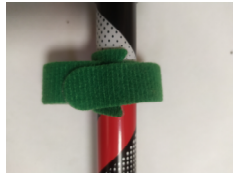

- לוודא שוו הפלסטיק הלבן אשר מתחת לסרט ההצמדה נמצא במצב סגור (מהודק).  
להחזיק את המוט בידית האחיזה כך שכל החלקים שהיו מקופלים יהיו עכשיו בקו ישר כלפי הקרקע.



- מתחת לוו הפלסטיק הלבן רואים את הקצה של המוט הצבעוני עם חץ שרשום עליו PULL.  
למשוך את המוט עם החץ כלפי מטה עד שכל החלקים מתחברים למוט אחד בקו ישר.



- למשוך עוד קצת את המוט עם החץ (קצת בכוח) עד שהנועל בצבע כסף נועל את מוט ההליכה.  
המוט מוכן לשימוש.



- ניתן לשנות את אורך המוט ע"י פתיחת וו הפלסטיק הלבן ומשיכת המוט החוצה עד למידת האורך הרצויה המסומנת על המוט.  
לנעול את וו הפלסטיק הלבן במידת האורך החדשה.



- המוט מתקפל לצורך איכסון.  
ניתן להתאים את הקצה התחתון לפי סוג הקרקע עליו הולכים.